



MASQUES UNS 2 DGE PRODUCTION

NOTICE D'UTILISATION :

Pour protéger votre santé et celle des autres,
il est très important de respecter cette notice d'utilisation

Référence du produit : MASQUE UNS 2

Domaine d'utilisation : Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes. L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque à visée collective est destiné à protéger l'ensemble d'un groupe portant ces masques dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce masque est porté par des personnes ayant des contacts professionnels occasionnels avec d'autres collègues (entreprise, service, bureau)

Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public. Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes).

Performances : Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020 (rapport d'essais RP/20-2248 n°2000305 du 10 avril 2020)

Masque catégorie 2 exclusivement réservés à des usages non sanitaires suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 26 avril 2020

Efficacité de filtration des particules de 3 μm : > 70%

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour une dépression de 100 Pa

Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2392/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1 du 15/04/2020) et qui supporte 10 lavages)

Utilisation :



Recommandations et limites d'utilisation : le temps de port du masque est limité à 4 heures.

Test au porter pendant 4 heures réalisé par nos soins. Lavage avant premier usage.

Recommandations de manipulation du masque :

Avant de mettre le masque:

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- inspecter le masque et s'assurer qu'il n'y ait pas de trous, de déchirures ou dégradations.
- Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue en évitant le contact avec les cheveux.
- Ne pas modifier le masque de quelque façon que ce soit.

Pour mettre le masque :

- Tenir le masque par les lanières élastiques
- appliquer le masque au niveau de la bouche de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage; passer les lanières élastiques derrière les oreilles ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;

Lorsque l'on porte un masque :

- éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque
- ne pas le porter en position d'attente sur le front ou sur le menton

