

DATOVA



SURBLOUSES ANTISALISURE LAVABLES ET REUTILISABLES

NOTICE :

Domaine d'utilisation : Cette surblouse est destinée au personnel hospitalier intervenant pendant la crise sanitaire liée au COVID19. Elle est portée par-dessus la tenue du personnel. Réalisée en taille unique, elle s'adapte à toute les morphologies grâce à son système de fermeture arrière réglable à l'encolure et à la ceinture fixée au niveau de la taille. Le bas de manche est muni d'un resserrage afin de permettre le port de gants de protection et si nécessaire d'une manchette de protection. Ce vêtement utilisé en milieu hospitalier, devra être lavé avant la première utilisation. Il est recommandé de fournir plusieurs surblouses par personne compte tenu de la rotation liée à l'entretien.

Matière : La matière textile résiste à un minimum de 50 cycles d'entretien industriel. 1 cycle d'entretien = lavage industriel 60°C + séchage en tunnel de finition

Composition : 100 % POLYESTER 150g/m2

Explication sur la méthode de lavage : Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique. Séchage en tambour. Cette surblouse a été conçu pour être réutilisé et lavé au minimum 50 fois.

Stockage : les surblouses non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière

Référence aux normes :

- Directive n°2001/95/CE du 03/12/01
- Règlement (UE) N ° 1007/2011 relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage

Je reconnais avoir lu et compris la notice d'utilisation des masques lavables et réutilisables vendus par la société DATOVA

SURBLOUSES ANTISALISURE LAVABLES ET REUTILISABLES

Vue de face

Vue de dos

